



WICHTIGE HINWEISE

Die Versandgefäße für die Harntitration enthalten 2 g Natriumchlorid, 200 µl Iso-
propanol und 4 mg Thymol. Dies dient zur Stabilisierung der Harnproben während des
Transportes. Bitte Berührung mit dem Stabilisator unbedingt vermeiden. Thymol verursacht
bei Hautkontakt Reizungen, bei längerem Kontakt mit Schleimhäuten und den Augen
Verätzungen. Beim Verschlucken können Schleimhautirritationen und Verätzungen im
Mund, in der Speiseröhre und im Magen auftreten.

Deshalb bitte beachten:

Vor dem Öffnen der Gefäße eventuell am Deckel anhaftendes Natriumchlorid durch
leichtes Klopfen entfernen.

Berührung mit dem Stabilisator vermeiden.

Nach dem Füllen (mindestens 20 ml Harn) das Gefäß mit dem Schraubdeckel gut ver-
schließen und kurz schütteln.

Falls doch direkter Kontakt aufgetreten sein sollte:

Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Eventuell kontaminierte
Kleidung sofort entfernen.

Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen (min-
destens 10 Minuten). Sofort Augenarzt hinzuziehen!

Verschlucken: Viel Wasser trinken. Erbrechen vermeiden. Sofort Arzt hinzu-
ziehen.