

Testset 908

Neurotransmitter im Urin Basis(F500) + Plus(F510) **+ Serotonin (F550) + Adrenalin(F600)**

Anleitung für den Urintest

Zweiter Morgenurin

- Messung Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Serotonin (Basis)
- + Glutamat, Gaba (Plus)

In dem Testset sind folgende Materialien enthalten:

1. **ein Urin-Probenröhrchen** (enthält eine weiß/gelbe Substanz mit einem Stabilisator)
2. **eine Plastikpipette** zum Überführen des Urins in das Probenröhrchen
3. **einen Aufkleber** zum Beschriften des Urin-Probenröhrchens
4. Urinauffangbecher können per Fax über das *Bestellformular Versandmaterial* (Nr. 63) bei biovis bestellt werden.

Durchführung:

Das **Urin-Probenröhrchen** muss mit dem **zweiten Morgenurin** gefüllt werden

Bitte fangen Sie einen Teil des **zweiten Morgenurins** in dem Plastikbecher (oder in einem entsprechend sauberen Gefäß) auf und überführen Sie diesen mit der Pipette in das Probenröhrchen bis zur Markierung knapp unterhalb vom Drehverschluss.

Bitte achten Sie darauf, dass die Stabilisatorsubstanz in dem Röhrchen verbleibt. Plastikbecher und - pipette können anschließend verworfen werden.

Bitte beschriften Sie das beigelegten Etikett mit

- Namen
- Datum
- kreuzen Sie Urin an

und kleben das Etikett auf das Urin-Probenröhrchen (Achtung!!!! Nicht auf das Umverpackungsröhrchen – weiss)

Nun stecken Sie das beschriftete Urin-Probenröhrchen in das Umverpackungsröhrchen (weiss), zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in den Briefumschlag und geben es zur Post.